

CRIOCARE™

CUSCINETTO CALDO FREDDO

RIUTILIZZABILE

Dimensioni 14 X 24 cm

CON FODERA
IN TESSUTO
ANATOMICO
E BENDA
REGOLABILE

INDICATO
PER TRAUMI
E CRIOTERAPIA



Eurospital
PHARMACEUTICAL



Dispotech Srl
Via al Piano, 29
23020 Gordona (SO) - Italy
info@dispotech.it
Rev. 08/10/2020 Ed. 00/02/2026



Eurospital S.p.A.
Via Flavia, 122
34147 Trieste - Italy
www.eurospital.com
Cod. distributore: 4228 - Rev. 0

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ASTUCCIO **PAP-221** **CARTA**

Verifica le disposizioni del tuo Comune



MADE IN ITALY



PRECAUZIONI Non ingerire il contenuto, non rompere l'involucro. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Inserire la busta sempre nell'apposita tasca o avvolgerla in un panno onde evitare ustioni. In caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud) utilizzare il prodotto solo dopo aver consultato il medico. Nel caso di utilizzo su neonati, bambini ed anziani, consultare il medico prima del trattamento. In caso di dubbio sul trattamento da effettuare e se la sintomatologia persiste consultare il medico. Non applicare su cute lesa. Solo per uso esterno. Non riutilizzare se il SACCO GEL CALDO/FREDDO è danneggiato (es.: fori, tagli). In caso di incidente grave verificatosi in seguito all'uso del dispositivo, segnalare al Fabbricante e all'autorità competente del proprio Paese di residenza.

FREDDO

INDICAZIONI D'USO Ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie ed in tutti i casi in cui necessiti la crioterapia e l'uso del freddo

MODALITÀ D'USO - FREEZER Porre in freezer per almeno 1.30 - 2 ore. Estrarre, inserire la busta nell'apposita tasca o panno ed applicare sulla parte interessata.

CALDO

INDICAZIONI D'USO Lombaggini, torcicollo, reumatismi, ipotermie ed in tutti i casi in cui necessiti l'applicazione del caldo.

MODALITÀ D'USO - ACQUA CALDA Immergere in acqua bollente per max 5 minuti. Estrarre, asciugare, inserire la busta nell'apposita tasca o panno ed applicare sulla parte interessata.

MODALITÀ D'USO - MICROONDE Posizionare per max 1 minuto regolando il forno microonde a 650 Watt. Estrarre, maneggiare il sacchetto per distribuire uniformemente il calore, inserire la busta nell'apposita tasca o panno e applicare sulla parte interessata.