

CRIOCARE™

GHIACCIO Istantaneo

PRONTO ALL'USO

Dimensioni
14X18 cm

2 BUSTE MONOUSO

INDICATO
PER TRAUMI E
CRIOterapia

2
PCS



Eurospital
PHARMACEUTICAL

GHIACCIO Istantaneo MONOUSO

ISTRUZIONI

Premere con entrambe le mani verso il centro fino ad ottenere la rottura della bolla interna. Agitare il sacchetto per miscelare il contenuto. Applicare sulla parte interessata.

INDICAZIONI D'USO

Ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie ed in tutti i casi in cui necessiti la crioterapia e l'uso del freddo. Il ghiaccio istantaneo ha effetto anestetico temporaneo e vasocostrittore.

CONTENUTO

Urea, cloruro d'ammonio e acqua.

ATTENZIONE

Solo per uso esterno, monouso. Il prodotto si dissipa una volta utilizzato. Non utilizzare se il sacchetto è danneggiato. Non rompere il sacchetto e non provocare la fuoriuscita del contenuto. Il contenuto macchia, irrita (in caso di contatto sciacquare con acqua l'area per 15 min.), è nocivo (se ingerito ricorrere subito all'intervento medico). Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili. Non congelare, non applicare su cute lesa. Contattare il medico in caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud), di utilizzo su bambini ed anziani, in caso di dubbio sul trattamento da effettuare e se la sintomatologia persiste. Non utilizzare su bambini sotto i 3 anni d'età. In caso di incidente grave verificatosi in seguito all'uso del dispositivo, segnalare al Fabbri-cante e all'autorità competente del proprio Paese di residenza.



Dispotech Srl
Via al Piano, 29
23020 Gordona (SO) - Italy
info@dispotech.it
Rev. 12 04/2024 Ed. 00 02/2026



Eurospital S.p.A.
Via Flavia, 122
34147 Trieste - Italy
www.eurospital.com
Codice distributore: 4229 - Rev. 0

RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO	CODIFICA	FAMIGLIA DI MATERIALE
ASTUCCIO	FPAP 231	CARTA

Verifica le disposizioni del tuo Comune

CE 1936

MADE IN ITALY



A990373108