


CRIOCARE GHIACCIO SPRAY - 200 ml

INDICAZIONI D'USO: Impiegato per lenire il dolore causato da traumi, contusioni, cadute o distorsioni ed in tutti i casi in cui necessiti la crioterapia e l'applicazione del freddo. Il suo effetto anestetico, indotto dal raffreddamento della parte contusa, permette una pronta ripresa dell'attività sportiva.


MODO D'USO: Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulla parte interessata da una distanza non inferiore a 20 cm per 3/4 secondi. Se necessario ripetere l'applicazione. L'anestesia meccanica da freddo elimina temporaneamente il dolore.

AVVERTENZE: Aerosol altamente infiammabile. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C/122°F. Recipiente sotto pressione. Contenitore pressurizzato può esplodere se riscaldato. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma libera o altre fonti di accensione, tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione, non fumare. Utilizzare in luogo ben ventilato. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto per non creare possibili accumuli di gas infiammabile. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Non erogare su cute lesa. Prima di spruzzare assicurarsi di non essere allergici al contenuto (CONTENUTO). Evitare il contatto con gli occhi, nel caso, sciacquare con acqua. In caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud) utilizzare il prodotto solo dopo aver consultato il medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare su neonati e bambini sotto i 3 anni, donne incinta e in allattamento. Nel caso di utilizzo su bambini e anziani, consultare il medico prima dell'impiego. In caso di dubbio sul trattamento da effettuare e se la sintomatologia persiste consultare il medico. Solo per uso esterno. In caso di incidente grave verificatosi in seguito all'uso del dispositivo, segnalare al Fabbricante e all'autorità competente del proprio Paese di residenza.

CONTENUTO: Isobutano, propano, butano, metilale, isopropilmiristrato, mentolo.

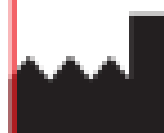


Dispotech Srl
Via al Piano, 29
23020 Gordona (SO) - Italy
info@dispotech.it
Rev. 06 04/2024 - Ed. 00 02/2026

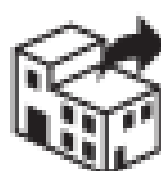

Eurospital S.p.A.
Via Flavia, 122
34147 Trieste - Italy
www.eurospital.com
Codice distributore: 4231 - Rev. 0



PERICOLO

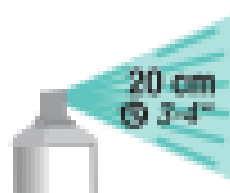

BOMBOLETTA		CHIUSURA	
PE 40	ACCIAIO	PP 5	PLASTICA
Bomba differenziale ventilata dotata di sistema di controllo del suo contenuto.			

Cont. **200** ml **MADE IN ITALY**

270 3 e MD



A990373110